

HANDLEIDING GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE

Benodigdheden
Koosguard + Desinfectie
+ Handschoenen

Benötigt
KoosGuard + Desinfektionsmittel
+ Handschuhe



Necessities
KoosGuard + Disinfection
+ Gloves

WERKWIJZE METHODE METHOD

- 1** Desinfecteer uw handen
Desinfizieren Sie Ihre Hände
Disinfect your hands



- 2** Optioneel: gebruik handschoenen
Optional: Benutzen Sie Handschuhe
Optional: wear gloves

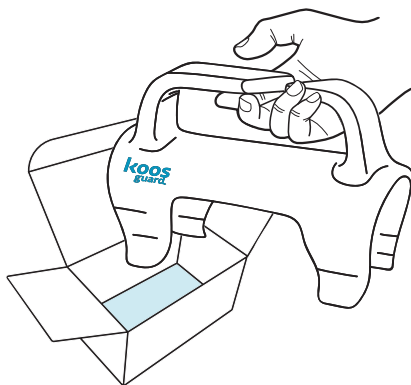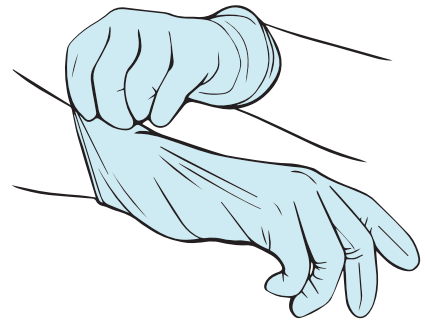

3


Haal de Koosguard uit de verpakking en desinfecteer
Nehmen Sie den Koosguard aus der Verpackung und
desinfizieren Sie den Koosguard
Unpack the KoosGuard and disinfect it

4

Klem de Koosguard
op het bedhek of
hoofdeinde van
het bed


Klemmen Sie den Koosguard
am Bettgitter oder am Kopfende
des Bettes

Clamp the KoosGuard on the bed
rail or head rest

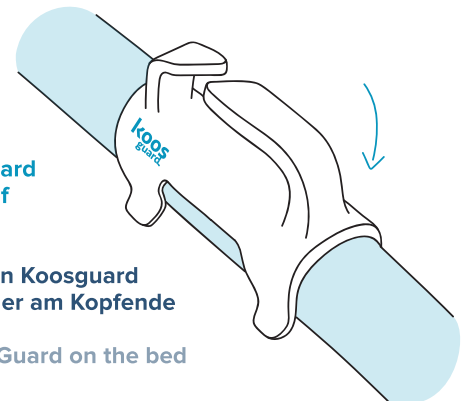

5

Plaats de kabels/
infuuslijnen via de
diagonale opening
in de Koosguard
Führen Sie Kabel
und Schläuche
mittels der diagona-
len Öffnung in
den Koosguard
Place the IV lines
and cables through
the diagonal opening
in the KoosGuard

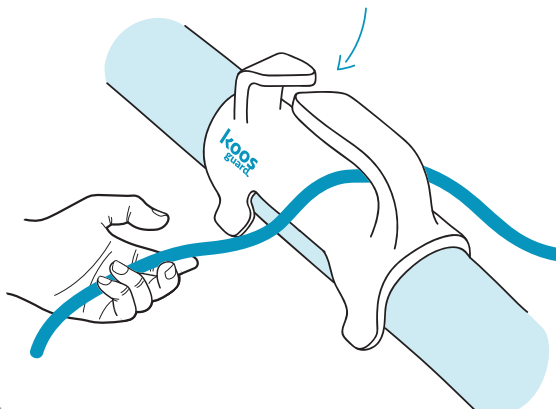

HERBRUIKBAAR WIEDERVERWENDBAR REUSABLE

De Koosguard is **desinfecteerbaar** met alle gangbare desinfectiemiddelen en tot **160° graden** steriliseerbaar. De Koosguard is bestemd voor: Infuuslijnen, Medicatielijnen, Monitorkabels/ECG-kabels en NIBP kabels.

Der Koosguard ist mit allen gängigen **Desinfektionsmitteln** zu desinfizieren und bis zu **160°** zu sterilisieren. Der Koosguard ist zu benutzen für: Infusionsschläuche, Medikationsschläuche, Monitorkabel, EKG Kabel und NiBP Kabel.

The KoosGuard can be **disinfected** with all commonly used disinfectants and is sterilizable up to a temperature of **160 degrees Celsius**. The KoosGuard is meant for: IV-lines, medication lines, monitor cables, ECG cables and NIBP cables.

BESTCARESOLUTIONS.NL